

Secteur Protéines
Dosage de TAU, PHOSPHOTAU, BETA-AMYLOÏDE 1-42
dans le LCR

Place Amélie Raba-Léon
33076 Bordeaux

Dr A. BEDEL (MCU-PH)
Tél : 05 56 79 56 79 poste 23660
Tel direct: 05 57 82 04 87
aurelie.bedel@u-bordeaux.fr

Étiquette du patient ou

Nom d'usage :
Nom de famille (naissance):
Prénom :
Sexe :
Date de naissance :/...../.....
N° d'identification :
Code postal: Ville:.....

Cachet du service (UG)

Téléphone :

Médecin Prescripteur :
Nom du préleveur :
Qualité du préleveur :
Date du prélèvement :
Heure du prélèvement :
Incidents survenus au cours du prélèvement :.....

Service clinique: cocher les cases

Renseignements cliniques

- Diagnostic précoce de MA (avant démence)
- Diagnostic différentiel MA
 - DLFT
 - DCL
 - angiopathie amyloïde:
 - HPN
 - autres démences:

Autres renseignements :
.....

Pré-analytique

cocher les cases

- Prélèvement le matin: heure:
- Recueil de 1,5mL dans tube en polypropylène (PP) bouchon blanc (10mL) ref SARSTEDT 62610201 fourni par le laboratoire de Biochimie ou le service de Neurologie IMN 2è étage
- Acheminement immédiat au laboratoire (max 2h à t° ambiante)

Pré-analytique par le laboratoire du site de prélèvement: cocher les cases

- Vérification du tube de prélèvement PP
- Centrifugation 10 minutes 5°C 4000 tr/min (3200G)
- Aliquotage immédiat surnageant : 3 aliquots de 300µL mis dans microtubes PP (SARSTEDT 72730006)
- Congélation -20°C si sites hors Pellegrin pour transport -20°C vers l' ABC de Hôpital Pellegrin
- Congélation -80°C pour Pellegrin: congélateur n°57, compartiment du bas

Si prélèvement d'un autre site que Pellegrin (GHS, GSA, extérieur)
Laboratoire de Biochimie de Pellegrin: cocher les cases

- Réception des échantillons aliquotés et congelés
- Stockage -80°C à Pellegrin congélateur n°57, compartiment du bas