

 <b>C·H·U</b> Hôpitaux de Bordeaux	<b>Services de soins et médico- techniques Groupe Sud</b> <b>Laboratoire d'anatomie pathologique du Groupe Sud</b>	<b>IN-LAB 402</b>
	<b>INSTRUCTION</b>	Ind : 01 Page : 1/2
<b>Modalités de prélèvements empreintes, brossages</b>		

## OUTILS

- feuille de demande d'examen spécifique au laboratoire d'anatomie pathologique renseignée en sa totalité et pochette de transport
- lames 76x26x3 ordinaires à plage dépolie.
- crayons à papiers.
- supports de protection en carton ou plastique pour transporter les lames.

## CONSIGNES

**Examen extemporané** : acheminer sans délai au laboratoire selon **IN LAB 401**

**Examen différé** :

Identification :

chaque lame doit être parfaitement identifiée avec le nom du patient et la nature de l'échantillon  
 chaque support de protection de lames doit être étiqueté avec les données administratives du patient

Conditionnement des échantillons :

Brossages :

- préparer 3 ou 4 lames avec le nom du patient et la localisation du prélèvement
- utiliser la brosse de fibroscopie préalablement humectée avec du sérum physiologique afin d'éviter la dessiccation cellulaire.
- rouler la brosse délicatement sans jamais repasser 2 fois sur le même endroit et sans écraser
- laisser sécher à l'air sans superposer les lames

Empreintes :

- préparer 3 ou 4 lames avec le nom du patient et la localisation du prélèvement
- si lésion sanglante, éponger sur une compresse délicatement avant de faire l'empreinte
- réaliser des appositions douces sans appuyer et sans repasser au même endroit.
- laisser sécher à l'air sans superposer les lames

**Date d'application** : 01/01/2004

## TABLEAU D'APPROBATION

	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION		APPROBATION	
Nom :	GAROSTE J.C	BAUD MN	Dr BELLEANNEE	Pr de Mascarel	
Fonction :	Technicien	Cadre médico technique	Anatomo pathologiste RQ	Chef de service	
Date :	01/09/2003	01/09/2003	01/09/2003	01/09/2003	
Signature :					

 <b>C·H·U</b> Hôpitaux de Bordeaux	<b>Services de soins et médico- techniques Groupe Sud</b> <b>Laboratoire d'anatomie pathologique du Groupe Sud</b>	<b>IN LAB 402</b>
	<b>INSTRUCTION</b>	
<b>Modalités de prélèvements empreintes, brossages</b>		

Informations à préciser sur la demande d'examen :

- nature de l'organe et siège du prélèvement
- diagnostic supposé ou connu
- antécédents et traitements éventuels
- motif du prélèvement, renseignements cliniques en particulier résultats des éventuels examens radiographiques et ou cytologiques antérieurs

Acheminement : Confier les supports correctement identifiés et accompagnés de la feuille de demande d'analyse correctement renseignée au dépôt navette de votre secteur  
L'acheminement de ces échantillons se fait température ambiante  
En dehors des heures d'ouverture du laboratoire, les échantillons doivent être conservés à température ambiante.