

INSTRUCTIONS DE PRELEVEMENT POUR LE DPNI ou ADNlc

INSTRUCTIONS DE PRELEVEMENT POUR LE DPNI ou ADNlc

Un tube **STRECK** doit être utilisé pour le prélèvement.

Le tube STRECK doit être rempli jusqu'à la flèche puis **mélangé par retournement 10 fois**.



Prélèvements sur site Pellegrin : Conserver les tubes à température ambiante et les faire parvenir à l'accueil de biologie centralisé le jour même. **Ne pas envoyer ces tubes par le pneumatique** puisqu'ils sont en verre.

Prélèvements extérieurs :

- Conserver et envoyer les tubes à température ambiante pour un envoi le jour du prélèvement.
- Conserver les tubes à 4°C pour la nuit et les envoyer à température ambiante le lendemain en cas de prélèvement tardif.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Virginie Raclet au laboratoire de Génétique moléculaire au poste 22168 ou Pr Caroline Rooryck Thambo au poste 23658.

Date d'application : 16/12/2021

TABLEAU D'APPROBATION

	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)	
Nom	RACLET VIRGINIE	LASSEAUX EULALIE		COMBOURIEU ISABELLE	ETIENNE MARIE RAPHAELLE
Signature	DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT				